

pedilay[®]med

GERBRAUCHSANWEISUNG

für **Pedilay[®]med** erstellt am 17.07.2020 durch Pedilay[®] Care GmbH.
Version 2.0; ersetzt 23.03.2020

GERBRAUCHSFERTIGER FUSSVERBAND

passend für rechten oder linken Fuß

INSTRUCTIONS FOR USE

for **Pedilay[®]med** issued 17.07.2020 by Pedilay[®] Care GmbH.
Version 2.0; replaces 23.03.2020

READY FOR USE FOOT BANDAGE

fits on the right or left foot

Foot Care.
Simply Better.

Pedilay Care GmbH
www.pedilay.care

Medizinprodukt
Medical Device



WAS IST PEDILAY® MED? WOZU WIRD ES ANGEWANDT?

Pedilay® med ist ein gebrauchsfertiger Fußverband, welcher den Fuß bis zum Knöchel umschließt und medizinische Behandlungen unterstützt. **Pedilay® med** wirkt als biokompatible Verbandsschicht, um die Haut zu schützen und zu unterstützen. **Pedilay® med** kann alleine oder in Verbindung mit anderen Produkten zur medizinischen Behandlung angewendet werden.

Bei Anwendung als Sekundär- oder Tertiärverband auf verletzter Haut wirkt **Pedilay® med** als zusätzliche Verbandsschicht. **Pedilay® med** kann helfen, darunterliegende Schichten zu bewahren und überschüssige Flüssigkeiten aufzunehmen.

Pedilay® med kann bei Patienten angewendet werden, welche eine kurz- oder langfristige medizinische Fußbehandlung erhalten oder bettlägerig oder eingeschränkt mobil sind.

DIE VORTEILE

- einfaches und schnelles An- und Ausziehen
- entwickelt für empfindliche Füße
- passt sich jeder Fußform an
- nicht spürbare Nähte
- reibungsarmes Material

FACHGERECHTER GEBRAUCH

Pedilay® med sollte stets von einer medizinischen Fachkraft oder Pflegefachkraft empfohlen werden. Bei nicht-medizinischen Anwendern sollte eine Ersteinweisung erfolgen.

Verwenden Sie **Pedilay® med** nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.



Pedilay® med als Primärlage:
Auf intakter, unverletzter Haut



Pedilay® med als Sekundärlage:
Auf verletzter Haut oder offenen Wunden mit
darunterliegender Primärlage (z.B. Pflaster)



Pedilay® med darf nicht angewendet werden:
Direkt auf verletzter Haut oder offenen
Wunden ohne darunterliegende Primärlage
(z.B. Pflaster)

Bei Unsicherheiten zur Verwendung oder bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes sollte die Verwendung unverzüglich ausgesetzt und ärztlicher Rat eingeholt werden. Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle an die **Pedilay® Care GmbH** und das **Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)**: Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn.


ANWENDUNG FÜR RECHTEN ODER LINKEN FUSS



1. Verschlüsse öffnen und **Pedilay® med** über die Zehen stülpen.



2. **Pedilay® med** nach hinten über den Fuß ziehen.

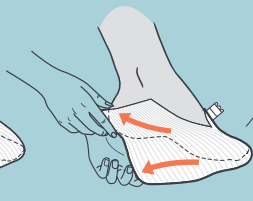

3. **Pedilay® med** bis auf die Fußlänge dehnen und über die Ferse nach oben ziehen.



4. Alle Verschlüsse in der gewünschten Position schließen.

VERSCHLÜSSE

KNÖCHEL


verläuft parallel zum Bund

FUSSRÜCKEN

verläuft entlang des Fußrückens (Rist) diagonal in Richtung Ferse

VORFUSS

verläuft entlang des Vorfußes (nur in den Größen S und L)

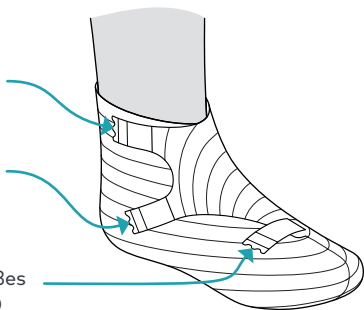

Hier finden Sie unser Anwendungs-Video:



ERHÄLTliche GRÖßEN

Hinweis:

Nicht-medizinische Anwender sollten die richtige Größe in Abstimmung mit einer medizinischen Fachkraft anprobieren und auswählen.

GRÖßEN	S	L	XL
Schuhgrößen	37 – 42 (EU)	41 – 46 (EU)	45 – 49 (EU)
Fußlängen	20 – 26 cm	25 – 32 cm	28 – 35 cm

Schuhgrößen und Fußmaße dienen lediglich zur Orientierung bei der Größenauswahl von **Pedilay® med**. Andere Faktoren können in Einzelfällen die Wahl einer anderen Größe erfordern. Siehe dazu auch die folgende Seite zur Größenauswahl.

Pedilay® med in den Größen **S** und **L** orientieren sich an normalen Fußformen entsprechend ihrer Schuhgrößen und Fußlängen. Für Füße mit besonderen Ansprüchen, z.B. durch starke Deformation oder Vergrößerungen im Volumen, kann **Pedilay® med XL** empfehlenswert sein.

GRÖßENAUSWAHL

Folgende Faktoren können gegebenenfalls eine andere Größe von **Pedilay® med** erfordern:

Skelettale Deformationen, extrem voluminöse Füße, angeschwollene Füße, Amputationen, zusätzliche Schichten aus Primär-/ Sekundärlagen.

RICHTIGE PASSFORM

Pedilay® med ist korrekt angelegt, wenn sich keine Hohlräume bilden, keine Löcher oder Falten entstehen und das Material keinen Druck/keine Kompression erzeugt

ANZEICHEN FÜR EINE FALSCHER PASSFORM

Pedilay® med fühlt sich eng an oder verursacht ein Gefühl der Taubheit. Das Material hat seine Wellenstruktur verloren und wirkt durchsichtig. Nähte oder elastische Fasern hinterlassen dauerhafte Einschnürungen. Die Verschlüsse können nicht mehr geschlossen werden.

HYGIENE UND ENTSORGUNG

Für eine optimale hygienische Versorgung wechseln Sie **Pedilay® med**:

- **täglich** bei akuten, infektiösen und nässenden Wunden
- wenn es **verschmutzt oder vollgesogen** ist
- wenn das Material **ausgedehnt oder gerissen** ist
- spätestens **nach 3 Tagen**

Entsorgen Sie das benutzte **Pedilay® med** **unmittelbar** nach dem Wechsel im regulären Haushaltsmüll.



Einmalgebrauch



Nicht waschbar



Bei infektiösen Wunden sind besondere Vorsichtsmaßnahmen angeraten:

- Verwenden Sie **Einweghandschuhe** oder **desinfizieren Sie Ihre Hände vor und nach** der Anwendung
- Entsorgen Sie **Pedilay® med** in einem **verschießbaren Abfallbehälter**
- In stationären Einrichtungen gelten zusätzlich die entsprechenden **betrieblichen und gesetzlichen Regelungen**